



Инструмент самодиагностики. Помогает предварительно оценить температуру тела человека. Необходимо приложить термометр к сухому лбу, удерживая его за края. Время измерения температуры примерно 15 секунд. Проявившееся изображение на шкале соответствует значению ниже:

- N** Нормальная температура;
- 37** Температура слегка повышена;
- 38** Температура повышена;
- 39** Высокая температура;
- 40** Очень высокая температура.

Для подтверждения результатов необходимо использовать медицинский термометр.

Использовать термометр при комнатной температуре. Чистить сторону, контактирующую с кожей, теплым мыльным раствором, не погружая термометр в воду целиком, или посредством препаратов для чистки кожи лица или тела, не содержащих спирта. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, хранить вне действия сильных источников тепла, спиртосодержащих жидкостей или растворителей.